



## UTILISATION



Formule douce

**BACTINYL® LINGETTES DESINFECTANTES PARFUMÉES** à usage unique est un produit destiné au nettoyage et à la désinfection par contact des surfaces et du matériel (y compris les surfaces sensibles).

Les lingettes peuvent aussi être utilisées pour la désinfection des mains.

Sans chlore, sans phénol, sans aldéhydes et avec moins de 5% d'alcool.

## ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE

Activité bactéricide du liquide d'imprégnation	durée	température	concentration
NF EN 1040	5 mn	20° C	20%
NF EN 1040 - Staphylococcus aureus résistant Pénicilline G et Oxacilline	5 mn	20° C	80%
NF EN 1276 conditions de saleté - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae et Escherichia coli	5 mn	20° C	20%
NF EN 1276 conditions de saleté - Pseudomonas aeruginosa	5 mn	20° C	40%
NF EN 1276 lait reconstitué 10% - Enterococcus hirae	15 mn	20° C	80%
NF T 72-171 conditions de saleté - Mycobacterium smegmatis	5 mn	32° C	20%
NF T 72-190 - Pseudomonas aeruginosa	5 mn	25° C	100%
NF T 72-190 - Mycobacterium smegmatis	15 mn	20° C	100%
Activité fongicide du liquide d'imprégnation			
NF EN 1275 (levuricide)	15 mn	20° C	20%
NF EN 1275	60 mn	20° C	80%
NF EN 1650 conditions de saleté (levuricide)	15 mn	20° C	80%
Activité virucide du liquide d'imprégnation			
NF T 72-180 - Rotavirus	15 mn	20° C	90%
NF T 72-180 - HIV1	15 mn	20° C	100%
NF T 72-180 - Poliovirus	5 mn	37° C	100%
NF T 72-180 - Herpès virus	5 mn	20° C	100%
NF EN 14476 - H1N1	1 mn	20° C	80%

Homologation du liquide d'imprégnation n° 2010578 du Ministère de l'Agriculture

Les composants entrant dans la composition du liquide d'imprégnation sont autorisés pour le contact alimentaire.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU LIQUIDE D'IMPREGNATION

Aspect : Liquide  
Couleur : Opalescent  
Odeur : Résineux  
Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4 °C  
pH pur : 10±1,0  
Péremption : 4 ans

## TOXICOLOGIE

DL 50 : 85 ml/Kg < DL 50 < 90 ml/Kg  
Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.  
Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

## PRECONISATIONS

Frotter les surfaces pendant au moins 2 secondes avec **BACTINYL® LINGETTES DESINFECTANTES PARFUMÉES**. Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf en cas de contact avec les denrées alimentaires). Bien refermer le couvercle après utilisation pour que le taux d'imprégnation soit optimum jusqu'à la dernière lingette. Ne remplace pas une désinfection par trempage.

## CONDITIONNEMENT

LB 920610 : Boîte de 40 lingettes - format 130\*150 mm  
LB 920600 : Boîte de 120 lingettes - format 130\*200 mm  
LB 920740 : Boîte de 120 lingettes - format 165\*400 mm  
LB 920650 : Lingettes sous pochette unitaire - format 130\*170 mm



## LEGISLATION ET SECURITE

Cf. Fiche de Données de Sécurité  
Ne pas mélanger avec des produits anioniques et chlorés. Ne pas avaler.

CE - 0398

