



UTILISATION



Formule douce

BACTINYL® PRET A L'EMPLOI est un désinfectant prêt à l'emploi destiné au nettoyage et à la désinfection par contact des équipements, matériels et de l'instrumentation, dispositifs médicaux non invasifs.

BACTINYL® PRET A L'EMPLOI s'applique par pulvérisation sur les surfaces à désinfecter.

Sans chlore, sans phénol, sans aldéhydes et avec moins de 5% d'alcool.

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE

Activité bactéricide	durée	température	concentration
NF EN 1040	5 mn	20°C	20%
NF EN 1040 - Staphylococcus aureus résistant Pénicilline G et Oxacilline	5 mn	20°C	80%
NF EN 1276 conditions de saleté - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae et Escherichia coli	5 mn	20°C	20%
NF EN 1276 conditions de saleté - Pseudomonas aeruginosa	5 mn	20°C	40%
NF EN 1276 lait reconstitué 10% - Enterococcus hirae	15 mn	20°C	80%
NF T 72-171 conditions de saleté - Mycobacterium smegmatis	5 mn	32°C	20%
NF T 72-190 - Pseudomonas aeruginosa	5 mn	25°C	100%
NF T 72-190 - Mycobacterium smegmatis	15 mn	20°C	100%
Activité fongicide			
NF EN 1275 (levuricide)	15 mn	20°C	20%
NF EN 1275	60 mn	20°C	80%
NF EN 1650 conditions de saleté (levuricide)	15 mn	20°C	20%
Activité virucide			
NF T 72-180 - Rotavirus	15 mn	20°C	90%
NF T 72-180 - HIV1	15 mn	20°C	100%
NF T 72-180 - Poliovirus	5 mn	37°C	100%
NF T 72-180 - Herpès virus	5 mn	20°C	100%
NF EN 14476 - H1N1	1 mn	20°C	80%

COMPOSITION

Peroxydes stabilisés, ammoniums quaternaires (Chlorure de Benzalkonium), huiles essentielles de Pin, Ethanol à 95° < 5%.

ORAPI EUROPE

FT LB 920723 – 920670 – Indice 02 – 15/06/2010

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 91
www.laboratoire-garcin-bactinyl.com

ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® EUROPE n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide
Odeur : Résineux
Couleur : Opalescent
Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C
pH : 10 ± 1
Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques et chlorés
Péremption : 4 ans
Homologation n° 2010578 du Ministère de l'Agriculture.
Les composants entrant dans la composition du liquide d'imprégnation sont autorisés pour le contact alimentaire.

TOXICOLOGIE

DL 50 : 85 ml/Kg < DL 50 < 90 ml/Kg
Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.
Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

INDICATIONS

BACTINYL® PRET A L'EMPLOI s'utilise pur pour le nettoyage et la désinfection par pulvérisation* :

- des surfaces ou des plans de travail,
- des pansements, cotons, etc. avant destruction,
- du linge souillé avant lavage, des textiles ou revêtements muraux, ...
- du matériel sitôt utilisé et en attente de nettoyage.

* ne remplace pas une désinfection par trempage

PROTOCOLE D'UTILISATION

BACTINYL® PRET A L'EMPLOI s'utilise en pulvérisateur manuel ou en appareil automatique (ATOMIST LGB 1035).

Pulvériser les surfaces à désinfecter.
Laisser sécher ou essuyer le matériel.

CONDITIONNEMENT

LB 920723 : flacon 500 ml (utilisation avec pistolet)
LB 920670 : bidon de 5 litres



LEGISLATION ET SECURITE

Cf. Fiche de Données de Sécurité
Ne pas avaler.
Ne pas pulvériser près d'une flamme ou d'une source électrique.
En cas de projection oculaire, rincer à l'eau claire.
*ne remplace pas une désinfection par trempage.

CE - 0398



ORAPI EUROPE

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 91
www.laboratoire-garcin-bactinyl.com

FT LB 920723 – 920670 – Indice 02 – 15/06/2010

ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® EUROPE n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.