



## Sanicid® 5 parfumé



### UTILISATION



Formule douce

**SANICID® 5 PARFUME** est un détergent-désinfectant concentré destiné au nettoyage et à la désinfection par contact des équipements de blocs opératoires, dispositifs médicaux non invasifs.

**SANICID® 5 PARFUME** est également utilisé pour le nettoyage et la désinfection des surfaces générales (sols, murs, surfaces, mobiliers, sanitaires).

**SANICID® 5 PARFUME** laisse une odeur fraîche et agréable.

### ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE

Activité bactéricide	durée	température	concentration
NF EN 1040	5 mn	20 °C	0.25%
NF EN 1276 conditions de saleté - Pseudomonas aeruginosa	15 mn	20 °C	2%
NF T 72-151 - spectre 5	5 mn	20 °C	1%
NF T 72-171 eau dure - spectre 4	5 mn	21 °C	2%
Activité fongicide			
NF EN 1275	60 mn	20 °C	4%
NF T 72-201- Penicillium verrucosum, Cladosporium cladosporioides et Candida albicans	15 mn	20 °C	0.25%
NF T 72-201- Absidia corymbifera	15 mn	20 °C	6%
Activité virucide			
NF T 72-180 - Poliovirus, Herpès virus	15 mn	37 °C	2%
Méthode non normalisée - Hépatite B	5 mn	20 °C	3%

### COMPOSITION

Peroxydes stabilisés, ammoniums quaternaires (Chlorure de Benzalkonium), huiles essentielles de Pin, tensioactifs non ioniques.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

**Aspect :** Liquide

**Odeur :** Résineux

**Couleur :** Ambre

**Conservation :** tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4 °C

**pH pur :** 9,6±0,5

**pH dilué à 0,25 % :** 8,1±0,5

**pH dilué à 1 % :** 9,1±0,5

**Incompatibilité :** ne pas mélanger avec des produits anioniques et chlorés

**Péremption :** 4 ans

ORAPI EUROPE

FT LB 922830 - 922870 - 922800 - 922791 - Indice 02 - 15/06/2010

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
5 allée des cèdres - 01150 Saint-Vulbas  
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 - Fax : +33 (0)4 74 40 20 91  
www.laboratoire-garcin-bactinyl.com

ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® EUROPE n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

## TOXICOLOGIE

DL 50 : 8,30 ml/Kg < DL 50 < 12,5 ml/Kg

Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.

Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

## INDICATIONS

**SANICID® 5 PARFUME** est destiné à la désinfection des sols, surfaces, murs, mobiliers, sanitaires.  
**SANICID® 5 PARFUME** présente des propriétés détergentes.

**SANICID® 5 PARFUME** est utilisé dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets de chirurgie dentaire et médicaux, industries, en collectivités ...

## PROTOCOLE D'UTILISATION

En entretien courant, **SANICID® 5 PARFUME** s'utilise dilué à 0,25 % (une dose de 20 ml ou la quantité de produit délivré par la pompe doseuse dans 8 litres d'eau froide ou tiède).

En cas de souillures importantes, la concentration peut être augmentée jusqu'à 1 %.

Utiliser en essuyage humide ou lavage pour les sols, cloisons, surfaces, mobilier, plans de travail et sanitaire.

En cas de lavage, il convient de laisser agir le produit quelques minutes avant d'évacuer l'émulsion (aspirateur à eau, balai Faubert, etc.).

Il n'est pas nécessaire de rincer.

## CONDITIONNEMENT

LB 922830 : doses de 20 ml

LB 922870 : flacon doseur 1 litre

LB 922800 : bidon de 5 litres

LB 922791 : bidon de 20 kg



## LEGISLATION ET SECURITE

Cf. Fiche de Données de Sécurité

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas avaler.

Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses.

CE - 0398



ORAPI EUROPE

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas

Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 91

www.laboratoire-garcin-bactinyl.com

FT LB 922830 - 922870 - 922800 - 922791 - Indice 02 - 15/06/2010

ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® EUROPE n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.