

# CONSIGNES D'UTILISATION DES BOITES «RIGIBOX» POUR LES DECHETS PERFORANTS D'ACTIVITES DE SOINS

conformes aux normes NF X 30-500, UN 3291, BS 7320 et TÜV

**adhesia**  
LABORATOIRE

## I. PRESENTATION DE NOTRE GAMME

| Référence  | Capacité utile en litres* | masse brute maximale en kg | Hauteur maximale en mm | Type d'ouverture (voir photos 2, 3 et 4) |
|------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| CA 0700    | 0,56                      | 0,65                       | 105                    | Type 1                                   |
| CA OS 700  | 0,58                      | 0,73                       | 140                    | Type 1                                   |
| CA 1800 S2 | 1,44                      | 1,75                       | 150                    | Type 2                                   |
| CA 2100 S2 | 1,68                      | 2,01                       | 170                    | Type 2                                   |
| CA 3000 S2 | 2,40                      | 2,96                       | 245                    | Type 2                                   |

↑ code inscrit sur le fond de la boîte

\*La capacité utile correspond au volume des boîtes au niveau de la limite de remplissage et est égale à 80% de la capacité réelle de la boîte.

Nos collecteurs sont réalisés en polypropylène, répondant aux exigences réglementaires de l'incinération et du respect de l'environnement.

## II. RECOMMANDATIONS PRÉALABLES A L'UTILISATION

- Lire attentivement les instructions de cette notice.
- Respecter les instructions de montage et les précautions d'emploi.
- N'utiliser les boîtes (collecteurs) qu'une fois, prêtes à l'emploi, correctement montées.
- Repérer le niveau de remplissage. (④, photo n° 1).
- Ces boîtes doivent être utilisées avec un support pour garantir la stabilité du collecteur et une utilisation mono-manuelle.
- Pour vous aider à choisir votre type de support, veuillez vous reporter au paragraphe VIII ou à notre notice F-3.
- Ces recommandations ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux consignes mises en place au sein de votre Etablissement.

## III. MISE EN SERVICE

- Le couvercle est livré séparément.
  - **Pour fixer le couvercle sur la boîte :**
    - Pour fixer le couvercle sur la boîte en respectant la correspondance des formes ① (photo n° 1).
    - Pour les modèles de boîtes équipés d'un organe de préhension ②, il faut prendre soin de positionner le couvercle, avec l'orifice d'introduction ③ placé à l'opposé de la poignée.
- Puis deux solutions possibles :**
- 1<sup>ère</sup> solution :
- Poser la boîte sur un plan de travail ou le plateau d'un chariot.
  - Exercer une pression à l'un des coins ④, puis continuer cette opération en suivant un ordre circulaire ⑤ ⑥ ⑦ (ne pas opérer en diagonale).
- 2<sup>ème</sup> solution :
- Retourner la boîte avec son couvercle pré-positionné sur un plan de travail.
  - Exercer une seule pression sur le fond de la boîte : le couvercle est clippé.

- Le couvercle doit être correctement clippé sur tout le pourtour du récipient.
- S'assurer que le couvercle soit correctement appliqué sur la collerette du récipient.
- S'il persiste un espace, c'est que le couvercle n'est pas correctement fermé :
  - ⇒ exercer alors une nouvelle pression énergique sur le couvercle à cet endroit.
- N'utiliser la boîte qu'une fois prête à l'emploi.

L'EFFICACITE ET LA SECURITE DE LA FERMETURE DEPENDENT DE LA FIXATION CORRECTE DU COUVERCLE SUR LE RECIPIENT, CORRECTEMENT MONTE, LE COUVERCLE EST INVOLABLE.

## IV. MODE D'UTILISATION

### Orifice d'introduction des déchets.

Le bouchon assure deux fonctions :

- **Une fermeture provisoire** pour assurer une plus grande sécurité en cours d'utilisation : le bouchon obstrue l'orifice par simple enfoncement.
- **Une fermeture définitive** lorsque la boîte est pleine, le bouchon se clippe dans le fond du goulot par enfoncement total : sa fermeture devient ainsi inviolable.

Les différents types d'aiguilles, emmanchés ou vissés sont déconnectables grâce à une série d'encoches de tailles différentes.

- ① **Encoches pour les aiguilles vissées :**  
Insérer le corps de l'aiguille dans le cran correspondant et dévisser en tournant la seringue. Libérée, l'aiguille tombe dans la boîte.
- ② **Encoches pour les aiguilles emboîtées :**  
Passer le corps de l'aiguille sous l'encoche et tirer sur la seringue.
- ③ **Encoches pour dévisser les aiguilles des stylos à insuline :**  
Introduire l'extrémité du stylo dans l'ouverture polygonale, dévisser l'aiguille, une fois libérée, l'enfoncer en exerçant une légère pression sur le corps du stylo, l'aiguille tombe dans la boîte.
- ④ **Orifice pour les seringues avec aiguilles non démontables ou tous objets piquants, tranchants.**
- ⑤ **Orifice de grande dimension équipé de deux clapets pouvant être ouverts** indépendamment l'un de l'autre, selon besoin.

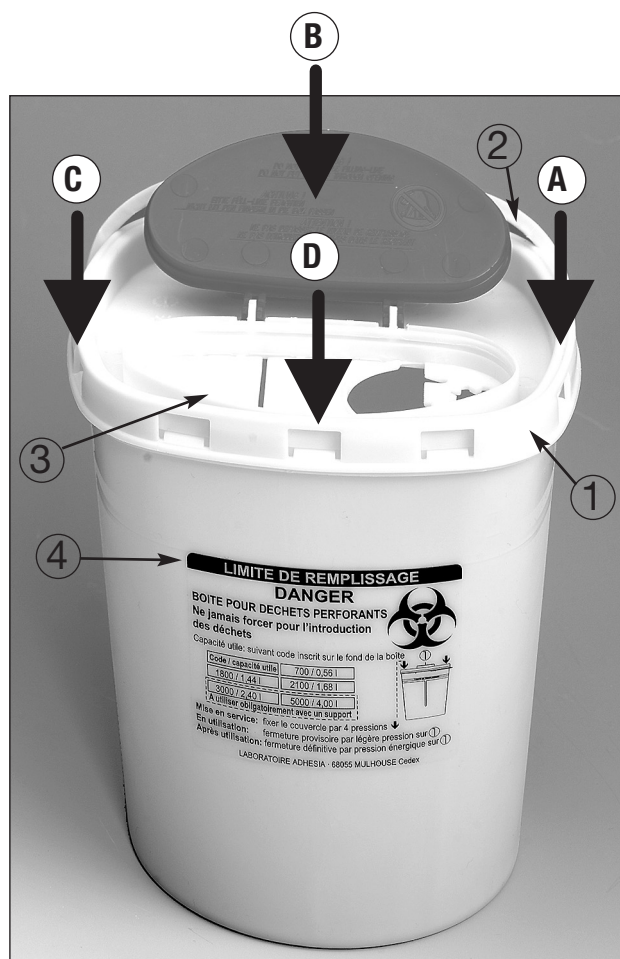


photo n° 1

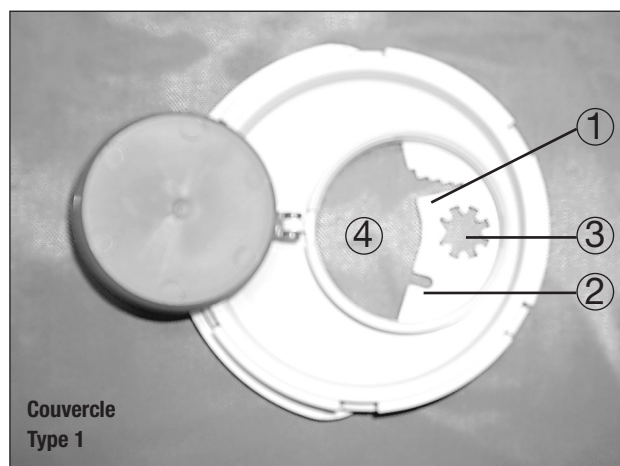


photo n° 2

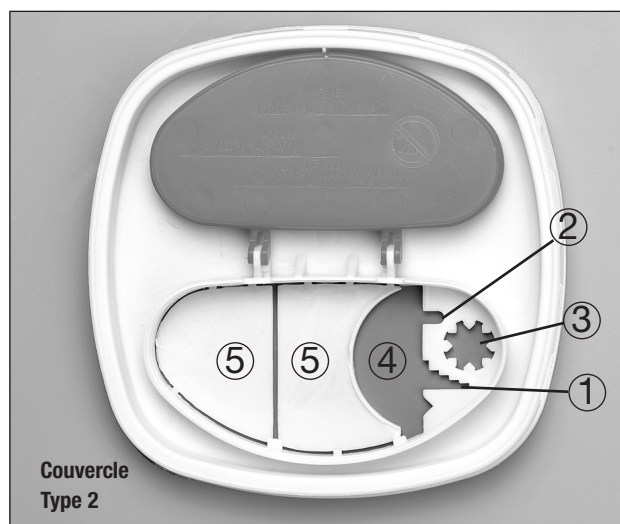





photo n° 3

## V. SIGNIFICATION DES MARQUAGES ET SYMBOLES

|   |  |
|---|--|
|  | Symbole du risque biologique                           |
|  | Produit réalisé en polypropylène, recyclable           |
|  | Date de fabrication de chaque pièce composant la boîte |

## VI. RECOMMANDATIONS LORS DE L'UTILISATION

- Ne pas placer la boîte à la portée des enfants.
- Fermer la boîte entre deux utilisations (fermeture provisoire).
- Ne jamais introduire tout ou partie de la main pour faciliter le passage des déchets dans l'orifice d'introduction des déchets.
- Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets.
- Ne pas jeter avec force les scalpels, mais les laisser tomber dans la boîte.
- Ne pas remplir au-delà de la limite de remplissage.
- Ne pas comprimer la boîte de l'extérieur.
- Ne pas appuyer la boîte contre soi pour la mettre en position de fermeture définitive.
- Ne pas jeter la boîte par terre.

## VII. RECOMMANDATIONS LORS DE L'EVACUATION

- Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier son verrouillage.
- Ne pas essayer de la réouvrir (la boîte ou le dispositif de fermeture).
- Ne pas placer ces boîtes dans des sacs ou autres emballages destinés au compactage.
- Déchets à éliminer conformément à la réglementation en vigueur concernant les déchets d'activité de soins à risques infectieux.

## VIII. POIGNEE DE PREHENSION

### Référence SCA 2102

La poignée garantit un maintien ou un transport en toute sécurité de la boîte.

Mise en place :

- Tenir la poignée d'une main, présenter la boîte sur l'embase de la poignée (A)
- Veiller à ce que l'orifice de la boîte ne soit pas positionné du même côté que la poignée.
- Visser d'un quart de tour (B) (sens des aiguilles d'une montre). La poignée est solidaire de la boîte.
- L'ensemble poignée - boîte ainsi constitué peut être fixé sur les supports SCA 2103 et 2104.

Ce type de support s'adapte sur tous les collecteurs de la gamme "Rigibox".



# IX. SUPPORTS

Nous proposons une gamme complète de différents types de supports :

- Support simple pour plan de travail, paillasse, dessus de chariot.  
Référence SCA 2104
- Support à fixation rapide, type ventouse, pour plan de travail, paillasse, dessus de chariot.  
Référence SCA 2103
- Support universel pour montage sur chariot / guéridons, pour fixation sur tige - référence SCA 100 C ; pour fixation sur rail, référence SCA 100 U



Support simple  
Référence SCA 2104

photo n° 5



Support à fixation rapide  
Référence SCA 2103

photo n° 6



Support universel  
Réf. SCA 100 C

photo n° 7

Instructions complètes de montage et d'utilisation dans notre notice FT/F-3.2

## Compatibilité d'utilisation avec nos modèles de boîtes.

| Boîtes \ Supports | SCA 2104 | SCA 2103 | SCA 100 U/C |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| CA 0700           | •        | •        | •           |
| CA OS 700         | •        | •        | •           |
| CA 1800 S2        | •        | •        | •           |
| CA 2100 S2        | •        | •        | •           |
| CA 3000 S2        | •        | •        | •           |