

FÜR DIE HYGIENISCHE UND SICHERE ENTNAHME VON URINPROBEN



IVD

URINBECHER mit integrierter Transfereinheit

Der Urinbecher mit integrierter Transfereinheit ermöglicht es Ihnen, Urinproben sicher zu sammeln und an den gewünschten Ort zu transportieren. Dank der integrierten Transfereinheit ist der Probentransfer vom Becher in ein evakuiertes Röhrchen einfach, schnell und hygienisch.

Das optimierte Gewinde des Urinbeckers ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen. Zudem verhindert eine Stabilisierungslippe ein Überschauben und sorgt für erhöhte Stabilität.

- / **Tiefsitzende Transfereinheit zur Reduzierung des Risikos von Nadelstichverletzungen.**
- / **Erhältlich in zwei Verpackungsvarianten: lose verpackt oder auch in Kleinverpackungen, um den unterschiedlichen Anforderungen bei der Verteilung in Gesundheitseinrichtungen gerecht zu werden.**

NEUES ETIKETTENDESIGN.

Das perforierte Etikett dient als Siegel für die Sterilität und zeigt visuell an, ob das Produkt vor dem Gebrauch bereits geöffnet wurde.



Urinbecher mit integrierter Transfereinheit

Art. Nr.	Volumen	Verschlussart	Deckelfarbe	Sterilität	UVP / VP [Stk.]
724321	100 ml	Schraubverschluss	gelb	steril	- / 300
724322	100 ml	Schraubverschluss	gelb	unsteril	- / 300
724325	100 ml	Schraubverschluss	gelb	steril	10 / 250

EMPFOHLENE HANDHABUNG

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung unter www.gbo.com.



1

Wenn mehr als ein Röhrchen befüllt werden soll, lösen Sie den Deckel etwas mehr als eine Vierteldrehung, um den Druck im Becher zu normalisieren.



2

Ziehen Sie das Sicherheitsetikett ab.



3

Röhrchen anstecken und warten, bis es vollständig gefüllt ist. Entnehmen Sie das Röhrchen anschließend.



4

Deckel schließen und Sicherheitsetikett wieder anbringen.