

# UNA RECOGIDA DE ORINA HIGIÉNICA Y SEGURA



IVD

## CONTENEDOR DE ORINA con unidad de transferencia integrada


El contenedor de orina con unidad de transferencia integrada le permite recoger y transportar muestras de orina de forma segura. Gracias a la unidad de transferencia integrada, el trasvase de la muestra del contenedor a un tubo de vacío es sencilla, rápida e higiénica.

El diseño optimizado de la rosca del contenedor de orina facilita su apertura y cierre. Además, un reborde estabilizador hace que el cierre del contenedor sea más seguro y evita el sobre-enroscado.

- / Dispositivo de transferencia integrado para reducir el riesgo de lesiones por punción accidental.
- / Disponible en bulk o en cajas de pequeños packs - para adaptarse a las diferentes necesidades de distribución dentro de los centros sanitarios.

### NUEVO DISEÑO DE LA ETIQUETA

La etiqueta perforada sirve de sello para garantizar la integridad de la esterilidad e indica visualmente si el producto ha sido abierto antes de su uso.

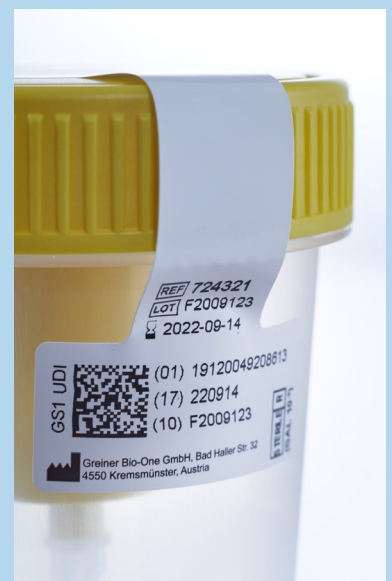

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O SOLICITAR  
MUESTRAS, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB O  
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

### Contenedor de orina con unidad de transferencia integrada

*evasado en bulk*

Referencia	Volumen	Tapa	Color de la tapa	Esterilidad	Embalaje interior / exterior [Uds.]
724321	100 ml	rosca	● amarillo	estéril	- / 300
724322	100 ml	rosca	● amarillo	no estéril	- / 300
724325	100 ml	rosca	● amarillo	estéril	10 / 250

## RECOMENDACIONES DE USO

Por favor, consulte las Instrucciones de Uso en [www.gbo.com](http://www.gbo.com).



1

Si se va a llenar más de un tubo, afloje la tapa algo más de un cuarto de vuelta para normalizar la presión dentro del vaso.



2

Despegue la etiqueta de seguridad.



3

Introduzca el tubo y espere a que se llene por completo. Retire el tubo después.



4

Coloque la etiqueta de seguridad en su posición original y vuelva a enroscar totalmente la tapa.