

# VEINVIEWER® QUICK GUIDE


**CHRISTIE+**

## VEINVIEWER® Flex

### BEDIENFELD: FUNKTIONEN UND MODI

#### Statusanzeige:

- Grün: in Betrieb
- Rot: Akku-Ladestand <25%
- Rot blinkend: Akku-Ladestand <10%
- Orange: Systemnachricht:  
Siehe Symbole am Bildrand  
oder Problembehebung in der  
Gebrauchsanweisung.
- Orange blinkend: Unzulässiger Tastendruck

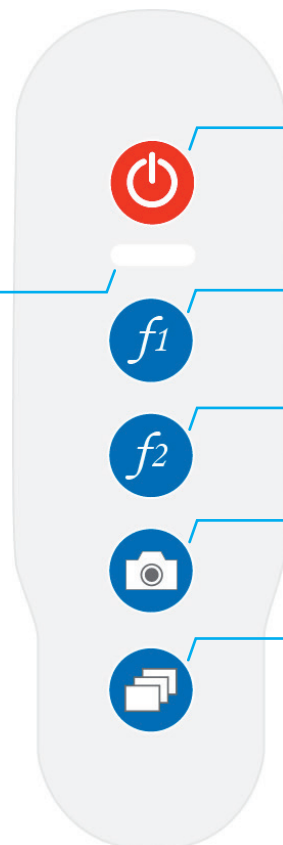

**Netzschalter**  
1 Sekunde halten zum Einschalten

**Funktionstaste 1\***  
Größe ändern (aus 3 Größen wählen)

**Funktionstaste 2\***  
Max. Helligkeit und  
Kathetergrößen-Referenzgrafik

**Bilderfassungs-Taste:**  
Bild mit Zeitstempel

**Bildmodus\***  
4 Optionen

\*Drücken Sie die Taste um  
die Modi durchzulaufen



# VEINVIEWER®


## Flex

## VENENVISUALISIERUNG IN NEUEM LICHT

### BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN




Größe ändern (drei Größen verfügbar)

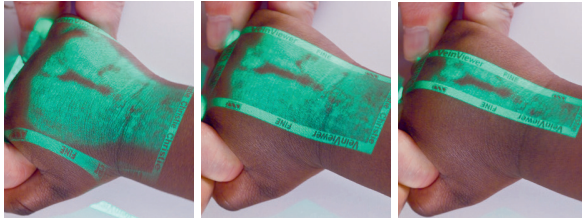


F2: Max. Helligkeit und CathCompass™

Maximale Helligkeit:

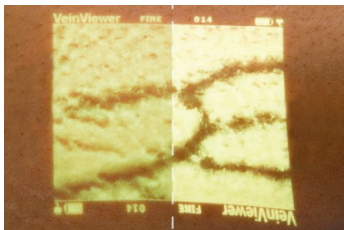

Hilfreich bei höheren Umgebungslichtstärken, wie zum Beispiel Sonnenlicht


CathCompass™

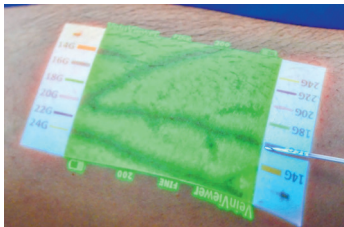


Aktiviert und deaktiviert die Kathetergrößen-Referenzgrafik.



Bildmodus (4 Optionen)

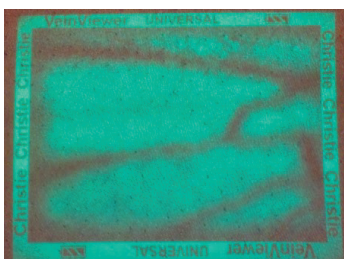

Universal eignet sich für alle Patienten

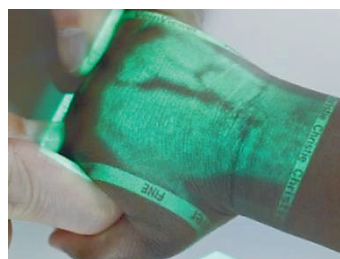

Fein (Detail) für Pädiatrie, Neugeborene bzw. Sklerotherapie



Universal mit Farbumkehrung




Fein (Detail) mit Farbumkehrung



Bilderfassung

Erfasst ein statisches Bild des projizierten Venenbildes mit Angabe der Zeit und speichert das Bild als BMP-Datei auf dem VeinViewer 3.0 Flex. Das erfasste Bild kann über eine USB-Verbindung auf einen PC übertragen werden. Das Fotoapparat-Symbol am Bildrand deutet auf gespeichertes Bild.

### KORREKTE FOKUSSIERUNG

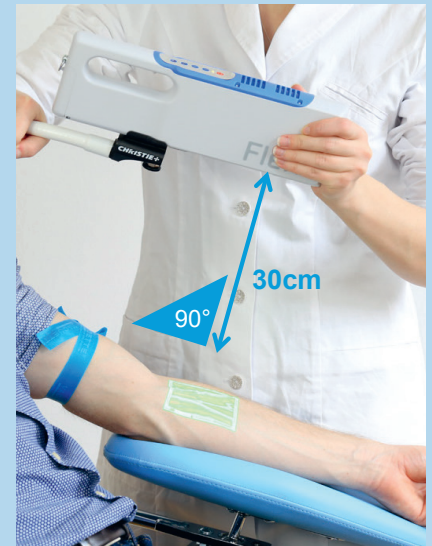

Die richtige Bildschärfe ist gegeben, wenn der Text um den Bildrand herum klar und gut lesbar ist.

