



VACUETTE® Blood Culture Holder

Uchwyt do pobierania krwi na posiew VACUETTE®

Instrukcja obsługi



Przeznaczenie

Uchwyt do pobierania krwi na posiew VACUETTE® służy do napełniania krwią butelek i probówek do posiewu krwi podczas standardowych zabiegów wkłucia dożylnego. Urządzenie może być używane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników służby zdrowia zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Opis produktu

Uchwyt do pobierania krwi na posiew VACUETTE® jest jednorazowy, niejałowy i wykonany z tworzyw sztucznych. Jest on zgodny ze wszystkimi łącznikami Luer VACUETTE® oraz zestawami do pobierania krwi SAFETY / zestawami do pobierania krwi VACUETTE®.

Obsługa

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące zestawów do pobierania krwi lub łączników Luer zawierają odpowiednie instrukcje obsługi.

PRZED WYKONANIEM WKŁUCIA DOŻYLNego NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE CAŁY NINIEJSZY DOKUMENT. PODCZAS WYKONYWANIA WKŁUCIA I OBCHODZENIA SIĘ Z PROBÓWKAMI DO POBIERANIA KRWI NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICZKI W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA NARAŻENIA!

- Dokręcić łącznik Luer oraz zestaw do pobierania krwi SAFETY / zestaw do pobierania krwi do uchwytu do pobierania krwi na posiew VACUETTE®. Upewnić się, że łącznik Luer jest dobrze przymocowany, tak aby nie odkręcił się podczas użytkowania.
UWAGA: Nieprawidłowe dokręcenie łącznika Luer do uchwytu do pobierania krwi na posiew VACUETTE® może spowodować uszkodzenie gwintów uchwytu i/lub łącznika Luer. To z kolei może doprowadzić do poluzowania łącznika Luer podczas wykonywania wkłucia dożylnego.
- Oczyszczyć miejsce wkłucia i umyć ręce zgodnie z zatwierdzonymi procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Zdezynfekować odsłonięte membrany butelek do pobierania krwi wacikiem nasączonym alkoholem i pozostawić do wyschnięcia.
- Wykonać wkłucie dożylnie przy ramieniu pacjenta skierowanym w dół. **UWAGA:** Butelki do posiewu krwi/probówki do pobierania krwi należy umieszczać prosto i wyśrodkowane. **UWAGA:** W celu prawidłowego obchodzenia się z butelkami do posiewu krwi należy przestrzegać instrukcji producenta.
- Umieścić uchwyt do pobierania krwi na posiew na butelkach i docisnąć w dół, aby przebić przegrodę.
UWAGA: Podczas stosowania butelek do posiewu krwi na bakterie tlenowe i beztlenowe najpierw należy wykonać posiew w butelce do posiewu krwi na bakterie tlenowe, a następnie w butelce do posiewu krwi na bakterie beztlenowe.
- Po uzyskaniu odpowiedniej ilości krwi należy zdjąć uchwyt z butelki i (jeśli to konieczne) kontynuować pobieranie krwi do probówek do pobierania krwi VACUETTE®.
- Po zakończeniu pobierania krwi delikatnie przyłożyć gazę na miejsce nakłucia, nie dociskając bezpośrednio wprowadzonej igły.
UWAGA: Przez cały czas korzystania z igły i podczas jej wyrzucania ręce powinny znajdować się z tyłu igły.
- Używając zestawu do pobierania krwi SAFETY, należy aktywować mechanizm zabezpieczający przez ściśnięcie gniazda z dwóch stron w celu włączenia blokady. Przesuwać mechanizm zabezpieczający do tyłu, aż rozlegnie się kliknięcie. Kliknięcie oznacza, że mechanizm zabezpieczający został prawidłowo aktywowany.
- Wyrzucić urządzenie z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako całość do odpowiedniego pojemnika na ostre narzędzia, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Używając zestawu do pobierania krwi, należy wyrzucić urządzenie z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako całość do odpowiedniego pojemnika na ostre narzędzia, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Ucisnąć miejsce wkłucia zgodnie z protokołem obowiązującym w placówce.
UWAGA: Nie uciskać zbyt mocno miejsca wkłucia.

Środki ostrożności / przestrogi

- Sprawdzić uchwyt do pobierania krwi na posiew przed użyciem. Nie używać go, jeśli jest uszkodzony.
- Na żadną igłę nie zakładać ponownie osłony.
- Po wykonaniu wkłucia dożylnego wyrzucić zestaw do pobierania krwi SAFETY / zestaw do pobierania krwi z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako całość do odpowiedniego pojemnika na ostre narzędzia zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Przez cały czas korzystania z igły i podczas jej wyrzucania ręce powinny znajdować się z tyłu igły.
- Ze wszystkimi próbkami pochodzenia biologicznego oraz „ostrymi” narzędziami do pobierania krwi (lancety, igły, łączniki Luer i zestawy do pobierania krwi) należy obchodzić się zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- W przypadku jakiegokolwiek narażenia na kontakt z próbkami pochodzenia biologicznego (np. wskutek ułknięcia igłą) należy uzyskać odpowiednią pomoc medyczną, ponieważ mogą one przenosić wirus HIV (AIDS) czy wirusowego zapalenia wątroby lub inną chorobę zakaźną.
- Wyrzucić wszystkie zużyte zestawy do pobierania krwi SAFETY / zestawy do pobierania krwi z uchwytem do pobierania krwi na posiew wraz z igłą do pojemników na odpady biologicznie niebezpieczne zatwierdzone do ich wyrzucenia.
- Przez cały czas wykonywania wkłucia dożylnego należy mieć założone rękawiczki w celu zminimalizowania ryzyka narażenia.
- Ponowne użycie uchwytu do pobierania krwi na posiew może prowadzić do choroby pacjenta z powodu zakażenia krzyżowego.

Dotyczy wyłącznie państw członkowskich Unii Europejskiej: Wszelkie poważne zdarzenia związane z produktem należy zgłaszać producentowi oraz właściwemu organowi w kraju członkowskim, w którym użytkownik/pacjent ma siedzibę.

Przechowywanie przed użyciem

Temperatura przechowywania: 4-25°C






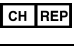
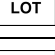


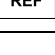

UWAGA: Nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Při překročení maximální doporučené teploty skladování může dojít k poškození držáku.


Utylizacja

- Należy brać pod uwagę ogólne zasady higieny oraz regulacje prawne dotyczące odpowiedniego usuwania materiału zakaźnego i postępować zgodnie z nimi.
- Rękawiczki jednorazowe zapobiegają ryzyku zakażenia.
- Zanieczyszczone produkty z igłami należy wyrzucić natychmiast po pobraniu krwi do odpowiednich pojemników do usuwania odpadów biologicznie niebezpiecznych, które można następnie wysterylizować w autoklawie i spalić.

Informacje na etykiecie

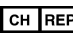
	Producent		Zakres temperatury		Wyrób medyczny
	Data ważności		Chronić przed światłem słonecznym		Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
	Kod partii		Nie używać ponownie		Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii
	Numer katalogowy		Zapoznać się z instrukcją obsługi		


Przeostoga: Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza.

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

Wyprodukowano w Austrii

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel. +43 7583 6791

 Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Szwajcaria

 Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business
Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire, Wielka
Brytania

