

# VÉRVÉTELI SORREND

A TELJES  
ELJÁRÁSRA  
VONATKOZÓ  
AJÁNLÁSOKAT

lásd az egyes  
termékek Használati  
utasításában a  
[www.gbo.com](http://www.gbo.com).  
weboldalon.

**VACUETTE®**

## Vérvételi csövek

a CLSI GP41-ED7 alapján

1

### VÉRKULTÚRA

vagy adalék nélküli cső

2

### NÁTRIUM-CITRÁT/CTAD\*

3

### SZÉRUM

szezátorral és anélkül

4

### HEPARIN

szezátorral és anélkül

5

### EDTA

szezátorral és anélkül

6

### GLIKOLITIKUS INHIBITOR

glükóz vizsgálatokhoz

7

### EGYÉB ADALÉKANYAGOK



#### MEGJEGYZÉS

Mindig kövesse a hatékony és biztonságos munkamódszereket és óvintézkedéseket a termékek használata és ártalmatlanítása során.

Ez a termékinformáció kizárólag egészségügyi szakembereknek szól. A Greiner Bio-One eszközeit csak megfelelően képzett egészségügyi szakemberek használhatják a vonatkozó használati utasításnak (IFU) megfelelően. A javallatok, ellenjavallatok, óvintézkedések és figyelmeztetések listáját megtekintheti az egyes termékekhez mellékelte használati utasításban, vagy letöltheti a [www.gbo.com](http://www.gbo.com) (Letöltések) weboldalról. További információért forduljon helyi Greiner Bio-One értékesítési képviselőjéhez, vagy látogasson el weboldalunkra.

A gondos feldolgozás ellenére nem vállalunk garanciát a közzétett vonatkozásában. A Greiner Bio-One GmbH bármely felelősséget, jótállást vagy garanciát ezúton kizár. Minden jog, beleértve a hiba és változtatás jogát is, fenntartva. Egyéb ezzel ellentétes rendelkezés hiányában, a Greiner Bio-One GmbH rendelkezik minden szerzői és/vagy egyéb felhasználói joggal ezen dokumentumokat illetően, különös tekintettel az olyan megjelölésekre, mint az említett (szó-kép) márkajelölések és logók. A Greiner Bio-One GmbH jogainak bármilyen felhasználása, sokszorosítása vagy bármilyen más felhasználása kifejezetten tilos.

Médiatulajdonos és kiadó: Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Str. 32, 4550 Kremsmünster

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

Greiner Bio-One Hungary Kft. / 9200 Mosonmagyaróvár / Fertősor 7.

TELEFON +36 96 213 088/ E-MAIL [office@hu.gbo.com](mailto:office@hu.gbo.com)

Vérvételi sorrend en [rev.03, 2021.04]

\* Ha szárnys vérvételi készletet használ, a sorrend első csöve alultöltött lesz. Ezért, ha először nátrium-citrátos csőből történik a mintavétel, a megfelelő adalékanyag-vér arány biztosítása érdekében, ajánlott előtte egy adalékanyag nélküli csövet használni.

  
**greiner**  
BIO-ONE