



Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE®

PT-BRA

(com protetor de rotação)

Instruções de uso

Indicação de Uso

O Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** deve ser utilizado apenas com as Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo **VACUETTE®**, Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE®** e com os Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo **VACUETTE®** como um sistema em procedimentos de punção venosa de rotina. Este produto possui um escudo de segurança que deve ser ativado imediatamente após a punção venosa, pois ajuda na proteção contra acidentes com perfurocortantes.

Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com estas instruções de uso.

Descrição do produto

O Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** é de plástico, não estéril e de uso único, possui um escudo de segurança que deve ser ativado imediatamente após a punção venosa para assim cobrir a agulha.

Cuidados/Precauções

1. Não usar o Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** quando danificado.
2. Qualquer Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** em contato com sangue torna-se contaminado e deve ser descartado imediatamente.
3. Não reencapar a agulha.
4. Não entortar a agulha.
5. Após a punção venosa, descartar a agulha e o Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** utilizados como um conjunto em recipiente apropriado, de acordo com as normas e os procedimentos da instituição.
6. Manter as mãos atrás da agulha durante todo o processo de manuseio e descarte.
7. Manipular todas as amostras biológicas e materiais perfurocortantes de acordo com as políticas e os procedimentos da instituição.
8. Obter atenção médica apropriada no caso de qualquer exposição a amostras biológicas (por exemplo, através de acidente com perfurocortantes), uma vez que estas amostras podem transmitir HIV, hepatite viral ou outras doenças infecciosas.
9. Descartar todos os materiais perfurocortantes em recipiente apropriado.
10. Luvas devem ser usadas durante todo o procedimento de punção venosa e descarte para minimizar o risco de exposição.

NOTA: Os Adaptadores de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** foram projetados para serem utilizados apenas com as Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo **VACUETTE®** (exceto 18G) e com as Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE®** da Greiner Bio-One. A utilização de agulhas provenientes de outros fabricantes é de responsabilidade da instituição.

NOTA: Qualquer incidente grave que ocorrer com o produto, deve-se comunicar o fabricante e a autoridade nacional responsável.

Armazenamento

Armazenar os adaptadores entre 4-25 °C.


NOTA: Evitar exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o produto.

Manuseio

LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA.

USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANUSEAR OS TUBOS DE COLETA DE SANGUE PARA MINIMIZAR O RISCO DE EXPOSIÇÃO!

1. Girar a embalagem e remover a parte posterior da agulha.
NOTA: A etiqueta perfurada é um indicador de esterilidade e de integridade do produto. Caso as etiquetas apresentem-se danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra.
2. Introduzir a agulha no Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®**. Certifique-se de que a agulha está firmemente presa de modo que não se solte durante o uso.
NOTA: Agulhas mal fixadas ao Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** podem resultar em danos para a rosca do adaptador e/ou da agulha. Estes danos podem fazer com que a agulha se solte durante a punção venosa.
NOTA: Não dobrar agulhas ou utilizar o Adaptador de Segurança QUICKSHIELD **VACUETTE®** se a agulha estiver dobrada.
3. O ponto sobre a tampa da agulha indica a localização do bisel.
4. O escudo de segurança pode rodar para a posição desejada, onde se mantém estável durante a punção venosa.
5. Selecionar o local de punção. Aplicar o torniquete (no máx. 1 minuto). Realizar a antissepsia no local da punção. Não apalpar o local da punção venosa após a antissepsia!
6. Posicionar o braço do paciente inclinado para baixo. Remover a capa protetora da agulha. Realizar a punção venosa com o braço do paciente inclinado para baixo e a tampa do tubo voltada para cima.

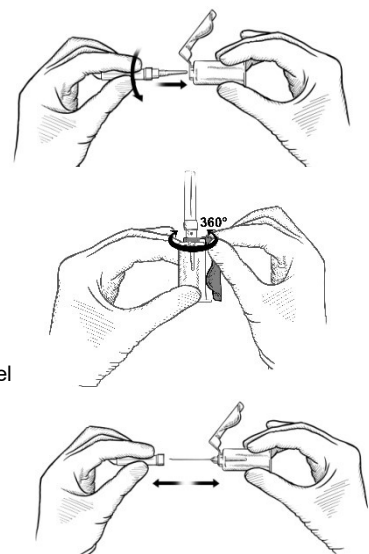

7. Empurrar o tubo para dentro do Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE® e a agulha irá perfurar a membrana de borracha. Os tubos devem estar centralizados no Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE®, para evitar a penetração lateral da agulha e subsequente perda prematura de vácuo.

8. Remover o torniquete assim que o sangue fluir no tubo. Não permitir que o conteúdo do tubo entre em contato com a tampa ou com o final da agulha durante o procedimento, ou seja, sob nenhuma circunstância o tubo deve ser virado para baixo durante o procedimento. Sempre segurar no local pressionando o tubo com o polegar para garantir o preenchimento completo do volume.

NOTA: Ocasionalmente o sangue pode vaziar a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar o risco de exposição.

9. Coloque os tubos sucessivamente no adaptador. Certifique-se de que o conteúdo do tubo não entre em contato com a tampa ou com a ponta da agulha durante a coleta de sangue.

10. Assim que o sangue parar de fluir no último tubo, retire-o e remova cuidadosamente a agulha da veia, em seguida, aplicar o material para hemostasia até o sangramento parar. Uma vez que o estancamento ocorreu, aplicar um curativo, se necessário.





Não reencape a agulha! O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes.

NOTA: Após a punção venosa, a parte superior da tampa poderá conter sangue residual. Tome as precauções apropriadas ao manusear os tubos para evitar o contato com o sangue.


Ativação do escudo de segurança

Imediatamente após remover a agulha da veia, utilizar os procedimentos a seguir para ativar escudo de segurança e evitar ferimentos causados por agulhas.

1. Ative o escudo de segurança pressionando-o suavemente sobre uma superfície estável. A ativação com um polegar também é possível, mas o polegar deve permanecer atrás do escudo durante todo o tempo. (Consulte A1/A2)
2. Um clique é ouvido assegurando ao usuário que o escudo de segurança foi corretamente e totalmente ativado. Assim, o risco de um ferimento causado por agulhas é praticamente eliminado. (B)
3. Descarte a agulha utilizada com o Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE® como um conjunto em um recipiente de descarte apropriado. (C)

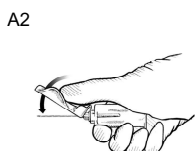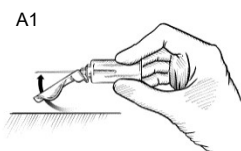

ou

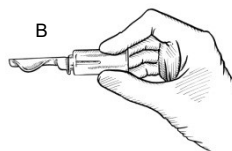

NOTA: Não force para liberar ou reativar o mecanismo de segurança depois de ter sido ativado.

Descarte

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material infeccioso, devem ser seguidas de acordo com o protocolo da instituição.

Luvas descartáveis previnem o risco de infecção.

Adaptadores contaminados devem ser descartados imediatamente após a coleta de sangue em recipientes apropriados que podem ser autoclavados e incinerados posteriormente.

Informações da Etiqueta

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | Fabricante | | Limite de temperatura |
| | Data de validade | | Não reutilizar |
| | Número de lote | | Consultar as instruções de uso |
| | Número do item | | Dispositivo Médico |
| | Manter protegido da luz solar | | |



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272

ANVISA / MS 10290310035

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com