

Utilisation prévue

Le kit de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémoculture est utilisé dans les procédures de ponction veineuse de routine. L'aiguille à ailettes du kit de prélèvement sanguin SAFETY est pourvue d'une gaine de sécurité destinée à recouvrir l'aiguille immédiatement après le prélèvement de sang, ce qui représente une importante contribution à la prévention des blessures par piqûre d'aiguille. Le support d'hémoculture est utilisé pour remplir les flacons et les tubes d'hémoculture.

Description du produit

Le kit de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémoculture est une aiguille de prélèvement sanguin à ailettes, stérile, à usage unique, fixée à un tube flexible avec un support d'hémoculture préfixé. La conception du support permet le prélèvement de sang dans des flacons d'hémoculture et des tubes de prélèvement sanguin VACUETTE®. Ces produits ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel. Ce dispositif doit exclusivement être utilisé par un personnel compétent et dans le respect du présent mode d'emploi.

Précautions/Mises en garde

- Vérifiez le set de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémocultures avant toute utilisation. Ne pas utiliser le set de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémocultures si l'ensemble est endommagé.
- Ne pas utiliser les kits de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémoculture après leur date de péremption.
- Tout kit de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémoculture qui est contaminé par du sang est considéré comme dangereux et doit être éliminé immédiatement.
- Ne pas activer prématurément le mécanisme de sécurité ou ne pas tirer violemment sur les ailettes, de telles actions peuvent porter atteinte à l'intégrité du dispositif.
- Ne pas replacer le capuchon sur l'aiguille du kit de prélèvement sanguin SAFETY. Le fait de reboucher les aiguilles augmente le risque de blessure par piqûre d'aiguille et d'infections dangereuses.
- Ne pas relâcher ou réactiver avec force le mécanisme de sécurité du kit de prélèvement sanguin SAFETY après son activation.
- Après la ponction veineuse, jetez l'aiguille usagée avec le kit de prélèvement sanguin SAFETY + support d'hémoculture en une seule unité dans un récipient pour objets tranchants approprié, conformément aux politiques et procédures de votre établissement.
- Gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.
- Ne tordez pas l'aiguille. Le fait de tordre l'aiguille peut provoquer des douleurs chez le patient, des blessures par piqûre d'aiguille, une contamination de l'aiguille causant des infections, une hémolyse de l'échantillon ou des dommages sur le tube d'acier et l'extrémité de l'aiguille.
- La manipulation des échantillons biologiques et des instruments de prélèvement sanguin « tranchants » (lancettes, aiguilles, adaptateurs Luer et dispositifs de prélèvement de sang) implique l'observation des protocoles et procédures de votre établissement.
- Demandez un avis médical approprié en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple lors d'une blessure par piqûre d'aiguille), car ceux-ci peuvent transmettre le VIH (SIDA), l'hépatite virale ou d'autres maladies infectieuses.
- Toute aiguille usagée doit être considérée comme contaminée et doit être jetée dans un conteneur d'élimination d'objets « tranchants » et contaminés conforme immédiatement après utilisation.
- Ne pas réutiliser. La réutilisation du produit peut entraîner des infections dangereuses pour la santé, des blessures voire même la mort.
- Éliminez tous les sets de prélèvement sanguin SAFETY utilisés, ainsi que leur support, dans des conteneurs pour déchets à risque biologique approuvés pour leur élimination.
- Portez en permanence des gants lors de la prise de sang pour réduire le risque d'exposition.
- Dans le cas de patients immobilisés, hémophiles, épileptiques, etc., une attention particulière s'impose lors du prélèvement sanguin.
- En raison du risque de contamination de surface consécutive aux gouttes de sang tombant de l'extrémité de l'aiguille usagée, celle-ci doit être orientée vers le haut au moment de son élimination.
- Ne recouvrez pas le mécanisme de sécurité d'adhésif.
- N'essayez pas de manipuler le mécanisme de sécurité après son activation.

Stockage

Stockez le produit entre 4 et 36 °C (40 à 97 °F).

REMARQUE : évitez toute exposition à la lumière directe du soleil. Le corps de pompe risque d'être endommagé s'il est stocké à une température supérieure à la température de stockage maximale recommandée.





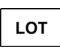




Manipulation

- Nettoyez le site de prélèvement et vos mains conformément aux procédures de votre établissement.
- Désinfectez les septums exposés des flacons de prélèvement sanguin à l'aide d'un tampon alcoolisé et laissez sécher à l'air.
- Prélevez en inclinant le bras du patient vers le bas. *Les flacons d'hémoculture et les tubes de prélèvement sanguin doivent être maintenus en position verticale pendant le prélèvement.*
- **REMARQUE :** suivez les instructions du fabricant pour la manipulation correcte des flacons d'hémoculture.
- Placez le support d'hémoculture sur le flacon et appuyez.
- Après avoir obtenu le volume de sang souhaité, éloignez le support du flacon et (si nécessaire) poursuivez le prélèvement de sang dans un autre flacon d'hémoculture ou dans des tubes de prélèvement sanguin VACUETTE®.
- Une fois le prélèvement de sang terminé, placez délicatement une gaze sur le site de prélèvement sans appliquer de pression.
- D'une seule main, activez le mécanisme de sécurité du kit de prélèvement sanguin SAFETY en appuyant sur les deux côtés du mécanisme de sécurité pour engager le verrouillage. Glissez le coulisseau du mécanisme de sécurité vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ce clic indique que le mécanisme de sécurité a été correctement activé.
- Appuyez légèrement sur le site de ponction à l'aide de la gaze, conformément au protocole de l'établissement.
- **REMARQUE :** veillez à ne pas exercer une pression trop forte sur le site de prélèvement.
- Éliminez le dispositif avec le support d'hémoculture sans le désassembler, dans le conteneur prévu pour les objets tranchants, conformément aux protocoles et procédures en vigueur au sein de votre établissement.
- **REMARQUE :** gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.

Mise au rebut

- Respectez les recommandations générales relatives à l'hygiène et la réglementation concernant la mise au rebut du matériel infecté.
- Des gants jetables doivent être portés pour éviter le risque d'infection.
- Les produits contaminés doivent être éliminés immédiatement après le prélèvement sanguin dans des conteneurs prévus à cet effet, qui peuvent ensuite être autoclavés puis incinérés.

Informations sur l'étiquette

	Fabricant		Limite de températures
	Date limite d'utilisation		À usage unique
	Code de lot		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Référence catalogue		Consulter le mode d'emploi
	Date de fabrication		

Mise en garde : la loi fédérale américaine limite la vente de ce dispositif par ou sur ordonnance d'un médecin.

Documentation :

CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.
CLSI. *Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline*. CLSI document M47-A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2007.

Site de production :
Nipro (Thailand) Corporation Ltd.,
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thaïlande
Fabriqué en Thaïlande
Distribué par Greiner Bio-One GmbH, Autriche

 Greiner Bio-One SAS
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Autriche

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Téléphone +43 7583 6791