



# Kullanım talimatları


## » Samplix® ile venöz kan alma talimatları «

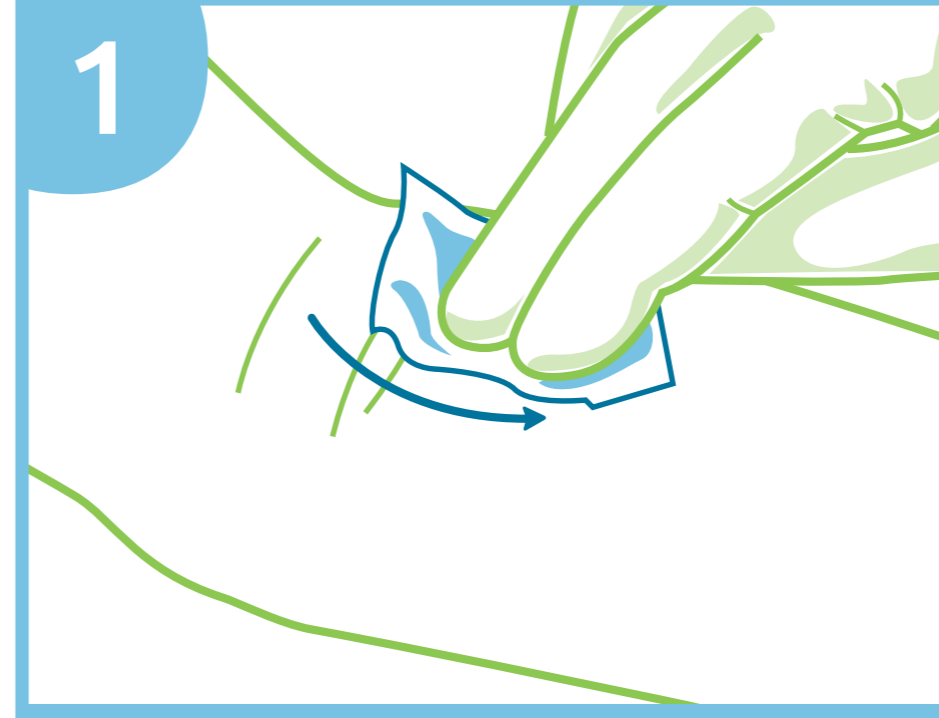


Kan alınacak bölgeyi temizleyin

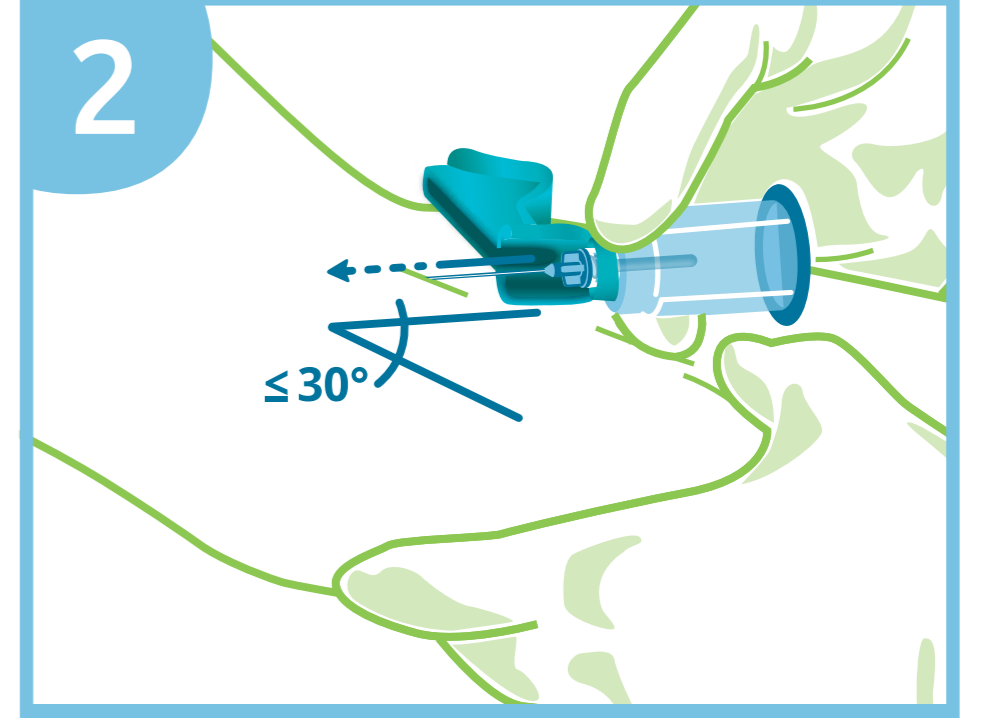


Damara 30° veya daha az açıyla girin

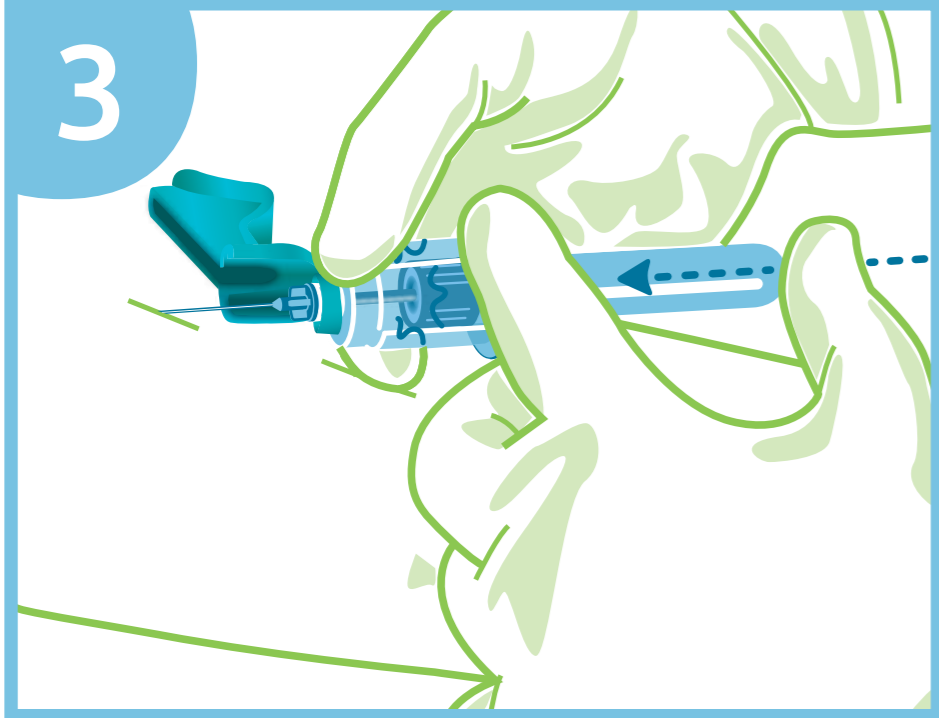


Tüpü holdera yerleştirmek için baş parmağınızı kullanın

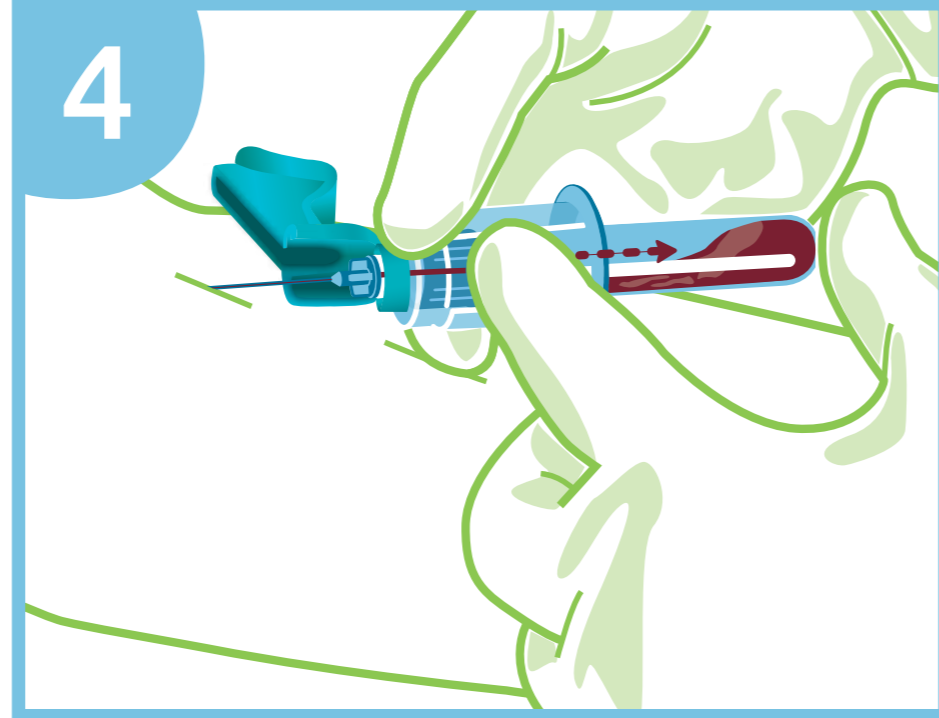

Tüp üzerinde bulunan seviye çizgisine kadar kan akışını bekleyin

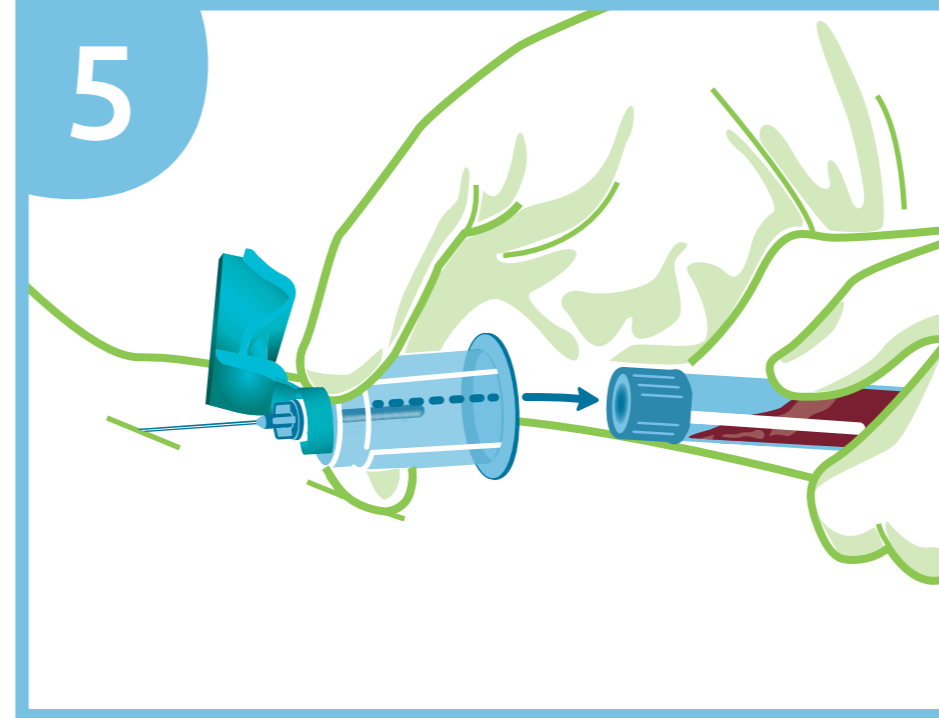


Kan akışı durunca, tüpü holderdan çıkarın

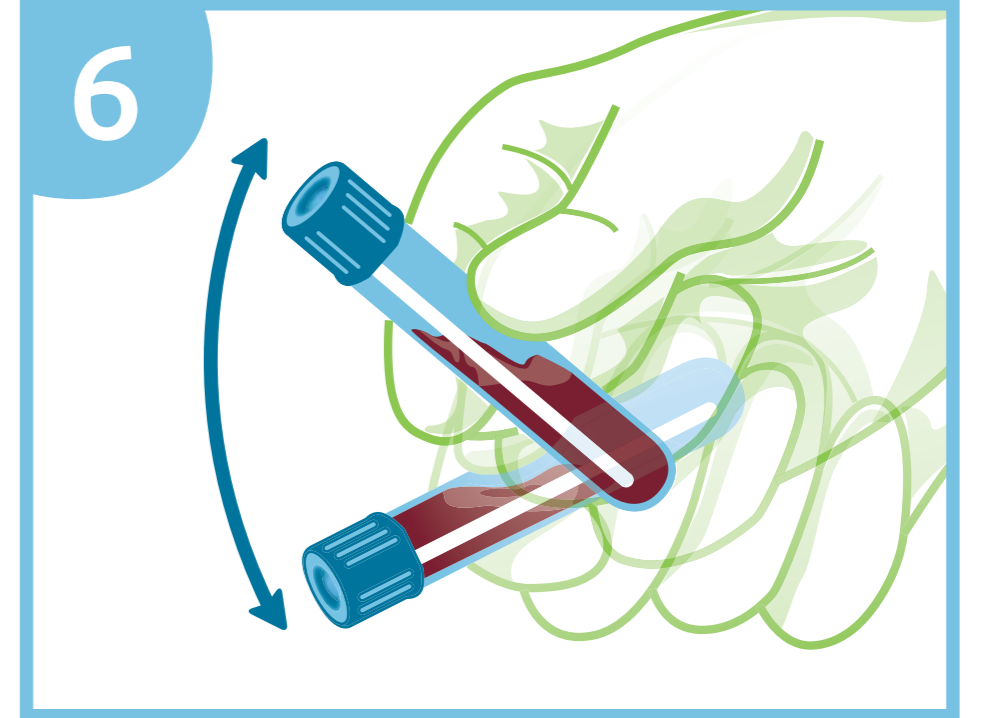


Tüpleri 5-10 kez alt-üst edin



» Hastadan birden fazla tüp alınacaksa, tüpleri doğru kan alma sırasına göre alın «

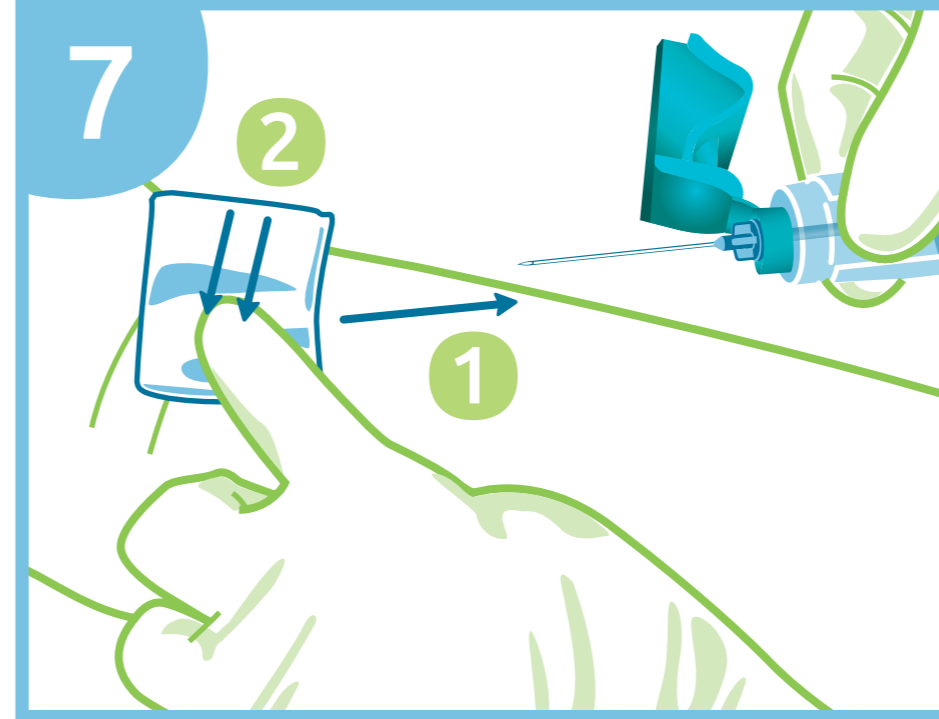


İğneyi damardan çıkarın.

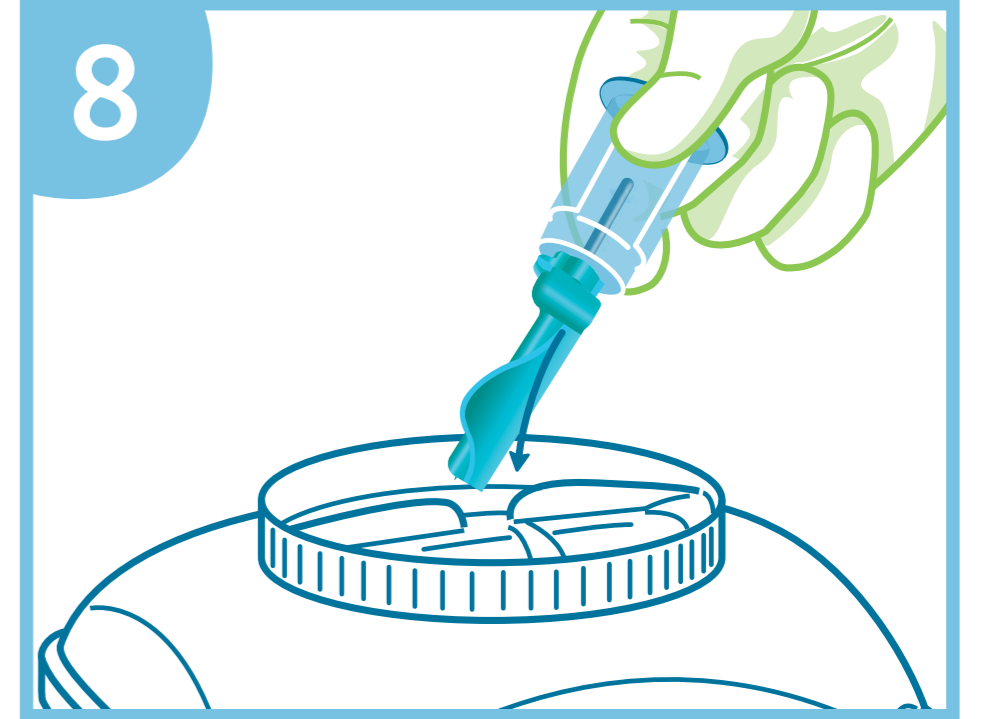

Kullanılmış holder ve iğneyi atık kabına atın

Bu talimatlar size Greiner Bio-One tarafından öneri olarak verilmektedir. Kan alma işleminin doğru şekilde yapılması konusunda size yardımcı olmayı amaçlar. Bu içerik uluslararası standartlara ve güncel teknik kaynaklara uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca ülkenizdeki sağlık kurumlarının talimatlarını da göz önünde bulundurunuz.

Venöz kan alma talimatlarını inceleyiniz.

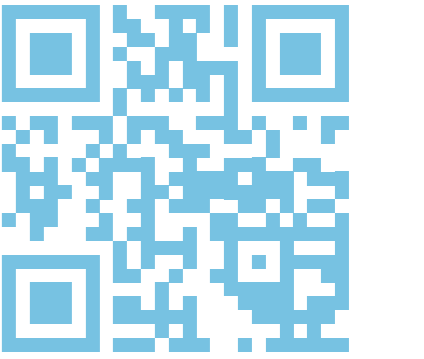

[www.samplix-blc.com](http://www.samplix-blc.com)

 **Samplix®**  
Avrupa'nın merkezinden  
gelen teknoloji